

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 5月 24日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300029	
作業年月日	2019年 5月 24日		作業時間	: / Hr	
顧客名	豊田内科 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県岩出市根来913-2		電話番号	: 0736-63-0297	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2013年 6月 19日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 362
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/5/18 / 373回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0204 / TOXC

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

EC-L600ZP, EG-LJ80NW, LASERFO, 分岐水栓, シック排水,
アルコールチャージへ。

装置 情報	交換後運転回数: 42 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 306 回	消毒+7L: 109 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 17 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.14031707 → NO.11030619
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140905-010 → NO.141104-004
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル		☐	1個	タッチパネル S/N: → S/N:

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R1年 5月 24日

ご署名

島田 優弥



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田