

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 12月 3日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300411
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 12月 3日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2014年 12月 17日
顧客名	みね内科クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	和歌山県新宮市井の沢6-34		電話番号 : 0735-22-5551
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐
			作業時間 / Hr
		定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 211
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/12/5 / 1807回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

待機時主電源ON.

夏への質問あり → オゾンの臭い。

3月-4月 移転の可能性あり。

装置	交換後運転回数: 408 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒: 916 回	消毒+アル: 1299 回
情報	リークチェック: 2202 回	自己洗浄: 518 回	アルコール単独: 9 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 10031341		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 13/204-014		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

2019年 12月 3日

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山本 豊子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田