

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 6月 17日

販売名 サビ・スミニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300309
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 6月 17日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2014年 7月 7日
顧客名	にきクリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県西宮市津門呉羽町1-28 今津医療センター4階		電話番号 : 0798-34-8181
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守の実施、タフネスの交換、「IHI」の画面が5枚まわらない。

不具合原因、作業内容

・コントロール基板の不具合が原因です。

コントロール基板・N. 06263/0971 → N. 06058/0975. タフネスN: 087374H029285 → S/N: R24824C057319.

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 365
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/7/9 / 3557回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / 704C	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・保守、タフネス、コントロール基板を交換し正常作動したので終了。

装置	交換後運転回数: 743 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1724 回	消毒+アル: 2576 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 14091939	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 170130-004	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
アルコール消毒液	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 6月 17日

ご署名 仁木正己 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山