

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 6月 24日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300345
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 6月 24日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2014年 8月 7日
顧客名	木下内科クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市平野区背戸口5丁目6番29号		電話番号 : 06-6790-1200
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・運転中に再起動したり、勝手にタッチパネルが起動する。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの不具合が原因です。念のためコントロール基板も交換。排水バルブ・セット撤去。
タッチパネル・S/N: 087374/H029542 → S/N: 124824C055132.
コントロール基板・N. 0710310971 → 0605810975.

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 423
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/10/11 / 436回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネル、コントロール基板を交換し正常作動したのを終了。

装置 情報	交換後運転回数: 18 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 5 回	消毒+7L: 509 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個
交換後 No.	
オゾンセンサー	☐ 1個
交換後 No.	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター セット	☐ 1個
(従来型・新型)	撤去。

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

11 12 貴行

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

1

中山