

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 7月 8日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 : 300045 作業年月日 : 2019年 7月 8日 納入年月日 : 2013年 9月 1日
顧客名	橋村医院 御中	ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市浪速区大国2-6-11	電話番号 : 06-6641-6512
作業区分	有償 ☐ 無償 ☒ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr	
出張・引取	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	定期点検シール記入 ☐ 修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 23/
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017/9/7 / 2228回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0204 / T02.B

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水フィルターを撤去し、正常作動したのを終了。

装置	交換後運転回数: 417 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 1553 回	消毒+アル: 1619 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個
交換後 No.	
オゾンセンサー	☐ 1個
交換後 No.	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター セト	☐ 1個
(従来型・新型)	撤去

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セト
	☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 7月 8日

ご署名

中村

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山