

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 11月 1日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300264	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 11月 1日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 5月 15日	
顧客名	医療法人敬愛会 大塚病院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県丹波市氷上町絹山513			電話番号	: 0795-82-7534
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間	Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・8/1(木)から10/28(月)まで、消毒履歴の濃度が10.00 ppmの時が計10回発生。
- ・タフパネルを触っていないのに起動力がある。

不具合原因、作業内容

- ・タフパネルの不具合が原因です。念のためコントロール基板も交換。
(無償)
- ・タフパネル S/N: 0873741/028612 → 124824C 057348。コントロール基板 N: 0404310971 → N: 0110810975。

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 571
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/5/11 / 1342回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T04C	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

- ・タフパネル、コントロール基板を交換し正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数：147 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：207 回	消毒＋アル：1580 回
	リークチェック：0 回	自己洗浄：967 回	アルコール単独：2 回	エア単独：0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

吳丹 真美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山