

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2019年 12月 18日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	300553
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	2019年 12月 18日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	2015年 4月 9日
顧客名	たけだクリニック 御中		ご担当	院長先生 様
所在地	大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目8-7		電話番号	06-6719-7011
作業区分	有償 ☐	無償 ☒	保証期間 ☐	作業時間 Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
・『E: 206 水温高異常』が計6回発生。				
不具合原因、作業内容				
・コントロール基板の不具合が原因です。コントロール基板を交換。				
・コントロール基板・NO, 1218410973 → NO, 0116810975。				
点検項目				
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 322
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日／交換回数	／	
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒	Ver. 0207 / T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項				
・コントロール基板を交換し正常作動したので終了。				

装置	交換後運転回数： 152 回	更新（リセット）実施 未実施	消毒： 16 回	消毒＋アル： 480 回
情報	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 6 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☐ 1個		オゾン分解触媒 ☐ 1個		排水栓 ☐ 1個	
交換後 No.		接続コネクタ；水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☐ 1個		接続コネクタ；チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ ☐ 1個		吸盤 ☐ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
（中空糸・活性炭・糸巻）		（従来型・新型）		アルコールキャップ、ブルー ☒ 1個	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL：06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山