

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 7月 19日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300331
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 7月 19日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2014年 7月 18日
顧客名	さくらクリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	和歌山県海南市名高140-1		電話番号 : 073-484-5001
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/14 : E:212 7:アーク異常, E:210 流量低下異常
11/13

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 464
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/7/27 / 1980回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / 704C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

アルコールキャップ 青へ ミニ7 EP-6000, ミニ7S (1003073)
EG-6400N, EG-6600R, EG-530NW, EC-6600P

装置 情報	交換後運転回数: 1092 回	更新 (リセット) <u>実施</u> / 未実施	消毒: 2258 回	消毒+アル: 238 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 6 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 10050204		接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 130619-004		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☒ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 7 月 19 日

ご署名 中尾 信子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田