

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 11月 29日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 : 300039 作業年月日 : 2019年 11月 29日 納入年月日 : 2013年 6月 26日
顧客名	曲直部クリニック 御中	ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市中央区伏見町2-5-7岡田伏見町ビル2階	電話番号 : 06-6226-4080
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr	
出張・引取	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 定期点検シール記入 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起重かしない。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの故障が原因です。

・タッチパネル: S/N: 087374H025730 → カラータッチパネル: S/N: 124824C055505。

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 257
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/1/16 / 1932回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0204 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し、正常作動したので終了。

装置情報	交換後運転回数: 0 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 24 回	消毒+アル: 1908 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 232 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		7L-1000P714	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 11 月 29 日

ご署名

清水 好美

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山