

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 1月 24日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100185
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 1月 24日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2011年 2月 3日
顧客名	奈良市立月ヶ瀬診療所 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	奈良県奈良市月ヶ瀬尾山2790番地		電話番号 : 0743-92-0030
作業区分	有償 ☐ 無償 ☒	保証期間 ☐	作業時間 / Hr
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

IHIの表示で「パネルがフリーズ」。
何度立ち上げてても同じ症状

不具合原因、作業内容

コントロール基板の交換。⇒ フリーズ 解消

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 489
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2017/9/15 / 337回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / T03D

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守点検表示対応 ⇒ 20年へ。
コントロール基板 交換 (111851 ⇒ 040671)
0973 0973

装置	交換後運転回数: 17 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 109 回	消毒+アル: 382 回
情報	リークチェック: 517 回	自己洗浄: 389 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 6 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2年 1月 24日

ご署名 47F

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田