

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1023675
発行日: 2020年 1月 20日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300471
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 1月 20日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年 1月 8日
顧客名	大垣クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	京都市下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655座經京都烏丸ビル5階		電話番号 : 075-371-1655
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目				
フタロック	正常 ☒		エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	残圧 11 MPa (緑)	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 410
アルコールライン	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒		電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒		マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		前回交換日/交換回数	2019/1/17 / 470回
殺菌槽 LED	正常 ☒		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205/T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 134 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 10 回	消毒+アル: 596 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 573 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 12040957		接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 170808-002		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☐ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

京都市下京区烏丸通仏光寺上る二帖半敷町655座經京都烏丸ビル5F
医療法人 優栄会 大垣クリニック
ご署名 理事長 大垣 雅晴
TEL 075-371-1655 FAX 075-371-1656
責任技術者 作業者
由井

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311