

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 8月 8日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100054
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 8月 8日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2010年 8月 25日
顧客名	水野内科医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市坊主町55		電話番号	: 079-224-2510
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	9回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 378
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2016/8/9 / 763回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / To3D	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：	124 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒：	1271 回	消毒＋アル：	0 回
	リークチェック：	0 回	自己洗浄：	1187 回	アルコール単独：	0 回	エア単独：

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No.	12091172
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No.	161018-016
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
マニホールド周辺フィルタ	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019年 8月 8日

水野 修

水野 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山