

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2019年 8月 26日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300974
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 8月 26日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2016年 9月 9日
顧客名	ふじもとクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府箕面市桜井1丁目7番20号 宝メディカルビル1階		電話番号	: 072-737-7186
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・8/26 (月) 『E: 210 光量低下異常1』 『E: 212 ランプ切れ異常』が各2回ずつ発生。

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 373
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 695 回	更新（リセット） 実施 未実施	消毒： 500 回	消毒＋7L： 560 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 0 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 14071853	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No.	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ；水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ；チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☐ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

岡田