

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 9月 2日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300241	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 9月 2日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 3月 24日	
顧客名	はり内科クリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県加古川市加古川町栗津770-18			電話番号	: 079-454-8510
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr	
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・電源が入らない。

不具合原因、作業内容

・スイッチング電源 (24V) の故障が原因です。

・スイッチング電源 (24V) を交換。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 326
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019/4/15 / 856回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0204 / T02BV

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・スイッチング電源 (24V) を交換し正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数:	37 回	更新 (リセット) 実施	未実施	消毒:	12 回	消毒+アル:	881 回
	リークチェック:	1 回	自己洗浄:	877 回	アルコール単独:	0 回	エア単独:	1 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空系・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		アルコールキャップ・ブルー	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 9 月 3 日

ご署名

責任技術者 作業者 中山

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311