

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 3月 3日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100229
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 3月 3日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2011年 5月 17日
顧客名	前川医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県奈良市登美ヶ丘1-12-3		電話番号	: 0742-46-2246
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル加熱, LED赤点滅 パネル立ち上がりず。

不具合原因、作業内容

タッチパネルの交換と復旧。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルズ数 184
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / Tol-A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

タッチパネル交換 S/N: 087374H011518 => 124824C051679
アルコールランプ 着。

装置	交換後運転回数: 989 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 868 回	消毒+アル: 958 回
情報	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 1308 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 29 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個
交換後 No. 12121253	
オゾンセンサー	☐ 1個
交換後 No. 140225-012	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
タッチパネル	☒ 1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 3月 3日

ご署名 前川 泰寛

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田