

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年3月26日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100468
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年3月26日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2012年3月16日
顧客名	邦和病院 様		ご担当 : 林検査室長 様
所在地	大阪府堺市中区新家町697-1		電話番号 :
作業区分 出張・引取	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	2 回目	定期点検シール記入 ☒
	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E202x7, E201x1, E212x1, E210x2, E212x1, E200x1

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 575
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 左上セビあり	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ (交換)
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2020.3.26 / 2773
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / 101.9

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 2034 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 591 回	消毒+アル: 2182 回
情報	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 19 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 17122951		接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 171213-003		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

2020年3月26日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 横山 一伴 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 早坂
作業者 2020.3.26
早坂