

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20190913

発行日： 2019 年 9 月 13 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	製造番号 500011 作業年月日 2019 年 9 月 13 日 作業時間 Hr
顧客名	西岡内科・在宅クリニック 様	TEL: 072-766-9919
所在地	兵庫県川辺郡猪名川町伏見台1-1-56	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 3 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒ 出張・引取 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9
2018 年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 500Lx2 3x 6.0MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 1198
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 穴2個通ぬ	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302 / T11A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数：373→0 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：8/7	殺菌/消毒+7H：366/366
	リークチェック：370	自己洗浄：43	7H-1単独：0 エア単独：0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 16062387			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：水槽側	☒	水フィルター	☒ 1
No 160229-009			接続コネクタ：チューブ側	☒		☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

元 年 9 月 13 日

西岡内科

印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者

作業者



中澤