

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20190924

発行日: 2019 年 9 月 24 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500006
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 9 月 24 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	米花クリニック 様	TEL: 0791-72-6565
所在地	兵庫県たつの市揖保川町正條188-3	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2019 年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 500L X2 残 661MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 571
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒ シワ 分岐あり
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 延長コード 3-スネ
トレイ	正常 ☒ ビン 2ヶ所 上側取り	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒ フジ ESR
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302 / T11A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数: 66 → 0 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 2 / 1	殺菌/消毒+7L: 65 / 64
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	7Lコル単独: 0
		エア単独: 0	

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. S1809016		
オゾンセンサー	☒	1
No 130718-006		
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☒ 1
水フィルター	☒ 1
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

米花 正晴

印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者

作業者



中澤