

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 4 月 14 日

|                              |                                                                        |                               |                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                           | Ver. 3.1                      | 製造番号 : 300305                                 |
|                              | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>               | Ver. 3.1                      | 作業年月日 : 2020 年 4 月 14 日                       |
|                              | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                   | Ver. 1.0                      | 納入年月日 : 2014 年 5 月 16 日                       |
| 顧客名                          | 内藤クリニック 様                                                              |                               | ご担当 : 院長先生 様                                  |
| 所在地                          | 兵庫県尼崎市南塚口町1-30-10                                                      |                               | 電話番号 : 06-6427-1570                           |
| 作業区分<br>出張・引取                | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/>     | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間 / Hr                                     |
|                              | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> | 4 回目                          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>              | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E403x2, E202x1, E110x1, E207x1, E302x1

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                          |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 393          |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm       |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2020.4.14 / 2405                                         |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207 / T02BV |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|    |                 |                  |              |             |
|----|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 878 回  | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 2331 回   | 消毒+アル: 74 回 |
| 情報 | リークチェック: 1543 回 | 自己洗浄: 188 回      | アルコール単独: 1 回 | エア単独: 1 回   |

| 交換部品名称                                         | 交換・数量 |
|------------------------------------------------|-------|
| オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| 交換後 No. 12030923                               |       |
| オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| 交換後 No. 140804-001                             |       |
| 給水フィルター <input type="checkbox"/> 1本            |       |
| (中空糸・活性炭・糸巻)                                   |       |

| 交換部品名称                                               | 交換・数量 |
|------------------------------------------------------|-------|
| オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/> 1個       |       |
| 接続コネクタ: 水槽側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |       |
| 接続コネクタ: チューブ側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| オゾン水濃度計用フィルタ <input checked="" type="checkbox"/> 1個  |       |
| 排水フィルター <input type="checkbox"/> 1個                  |       |
| (従来型・新型)                                             |       |

| 交換部品名称                                                | 交換・数量 |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 排水栓 <input checked="" type="checkbox"/> 1個            |       |
| エアフィルター <input type="checkbox"/> 1個                   |       |
| 水フィルター <input type="checkbox"/> 1個                    |       |
| 吸盤 <input checked="" type="checkbox"/> 1個             |       |
| マニホールド周辺チューブ <input checked="" type="checkbox"/> 1セット |       |
| <input type="checkbox"/>                              |       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 4 月 14 日

ご署名 丹波

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者             |
|-------|-----------------|
| 早坂    | 2020.4.14<br>早坂 |