

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 10月 21日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100480
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 10月 21日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2012年 6月 13日
顧客名	みやわきクリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府堺市南区鴨谷台2-1-5 サンピア2番館2階		電話番号 : 072-284-0555
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr		
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起動しない。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの不具合が原因です。タッチパネルを交換。

・タッチパネル・S/N: 087374H014476 → カラ・タッチパネル・S/N: 124824C052626.

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	パネル数 408
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒	
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数			2017/6/2 / 1622回
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒	Ver. 0107(T03D)

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し、正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数：	0 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：	9 回	消毒＋アル：	2205 回
	リークチェック：	0 回	自己洗浄：	1393 回	アルコール単独：	1 回	エア単独：

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個
交換後 No.	
オゾンセンサー	☐ 1個
交換後 No.	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

宮脇 晴彦

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山