

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 10月 21日

|                                    |                                                                        |                               |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 販売名<br>／<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/>                | Ver. 3.1                      | 製造番号 : 100230                      |
|                                    | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                          | Ver. 3.1                      | 作業年月日 : 2019年 10月 21日              |
|                                    | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                   | Ver. 1.0                      | 納入年月日 : 2011年 9月 29日               |
| 顧客名                                | 衣笠医院 御中                                                                |                               | ご担当 : 院長先生 様                       |
| 所在地                                | 京都府京都市右京区龍安寺斎宮町5                                                       |                               | 電話番号 : 075-462-8473                |
| 作業区分                               | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/>     | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間 Hr                            |
|                                    | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> | 8回目                           | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取                              | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>              | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

| 点検項目     |                                        |              |                                                           |
|----------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 507           |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm        |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日／交換回数   | 2016/10/4 / 116回                                          |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0107 / TOL. A |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |               |                                                                             |              |              |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 11 回 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒: 8 回      | 消毒＋アル: 161 回 |
|          | リークチェック: 0 回  | 自己洗浄: 3 回                                                                   | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称                                      | 交換・数量 |
|---------------------------------------------|-------|
| オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/> | 1個    |
| 交換後 No. 15122206                            |       |
| オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/> | 1個    |
| 交換後 No. 160913-002                          |       |
| 給水フィルター <input type="checkbox"/>            | 1本    |
| (中空糸・活性炭・糸巻)                                |       |

| 交換部品名称                                            | 交換・数量 |
|---------------------------------------------------|-------|
| オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/>       | 1個    |
| 接続コネクタ; 水槽側 <input checked="" type="checkbox"/>   | 1個    |
| 接続コネクタ; チューブ側 <input checked="" type="checkbox"/> | 1個    |
| オゾン水濃度計用フィルタ <input checked="" type="checkbox"/>  | 1個    |
| 排水フィルター <input type="checkbox"/>                  | 1個    |
| (従来型・新型)                                          |       |

| 交換部品名称                                  | 交換・数量                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 排水栓 <input checked="" type="checkbox"/> | 1個                       |
| エアフィルター <input type="checkbox"/>        | 1個                       |
| 水フィルター <input type="checkbox"/>         | 1個                       |
| 吸盤 <input checked="" type="checkbox"/>  | 1個                       |
| マニホールド周辺チューブ <input type="checkbox"/>   | 1セット                     |
|                                         | <input type="checkbox"/> |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和元年 10月 21日

ご署名 堂原有希

福岡印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 由井  |