

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019年 10月 22日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100550
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 10月 22日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2012年 9月 4日
顧客名	三好内科 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府池田市呉服町3-9 サンロイヤル池田駅前1階		電話番号 : 072-752-2936
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・自吸ポンプ（排水ポンプ）より異常音が発生。

不具合原因、作業内容

- ・自吸ポンプ（排水ポンプ）の劣化が原因です。
- ・自吸ポンプ（排水ポンプ）SF90-209A3S・NO, 10209 → NO, 01203。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 493
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019/10/22 / 18473回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / T03D

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・保守部品、自吸ポンプ（排水ポンプ）を交換し正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 2096 回	更新（リセット） <u>実施</u> 未実施	消毒: 11994 回	消毒+アル: 6479 回
	リークチェック: 17045 回	自己洗浄: 6479 回	アルコール単独: 387 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No.	51803001	接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.	141126-003	オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		自吸ポンプ	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 11月 7日

ご署名

三好洋二 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山