

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 11月 11日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300346
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 11月 11日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 7月 28日
顧客名	そうわ内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市浪速区浪速東3-9-24		電話番号	: 06-6626-9939
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間	☐ 作業時間 2 Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張 引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

操作ディスプレイ(タッチパネル)が表示しなくなる。

不具合原因、作業内容

タッチパネルの寿命による表示不良。
コントロール基板交換。

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☐ バルブ数
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数		/
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☐ Ver. 0207 / T04C

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

(・0215810975/コントロール基板交換(旧品:0716310971))
(・124824C057380/カラーディスプレイ交換(旧品:087374 H029530))

装置 情報	交換後運転回数：	162 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：	151 回	消毒＋アル：	1395 回
	リークチェック：	1 回	自己洗浄：	2 回	アルコール単独：	0 回	エア単独：

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個
交換後 No.	
オゾンセンサー	☐ 1個
交換後 No.	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 11 月 11 日

ご署名

大西 里 歌



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田