

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 11月 14日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>	Ver. 3.1	製造番号	: 300708	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 11月 14日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>	Ver. 1.0	納入年月日	: 2015年 12月 15日	
顧客名	ツカザキ病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県姫路市網干区和久68-1		電話番号	: 079-272-8555	
作業区分 出張・引取	有償 <input checked="" type="checkbox"/>	無償 <input type="checkbox"/>	保証期間 <input type="checkbox"/>	作業時間	Hr
	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	4回目	定期点検シール記入	<input checked="" type="checkbox"/>
	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付	<input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> パルス数 568
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	前回交換日/交換回数	2018/11/15 / 5043回	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	運転プログラムバージョン	正常	<input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207/T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1299回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 624回	消毒+7L: 5718回
	リークチェック: 1回	自己洗浄: 1181回	アルコール単独: 524回	エア単独: 5回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 51809011	
オゾンセンサー	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
交換後 No. 120829-007	
給水フィルター	<input type="checkbox"/> 1本
(中空系・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ; 水槽側	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
接続コネクタ; チューブ側	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
排水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	<input checked="" type="checkbox"/> 1個
エアフィルター	<input type="checkbox"/> 1個
水フィルター	<input type="checkbox"/> 1個
吸盤	<input type="checkbox"/> 1個
マニホールド周辺チューブ	<input checked="" type="checkbox"/> 1セット
	<input type="checkbox"/>

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 横手 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山