

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年 6月 30日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100799
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 6月 30日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2013年 8月 22日
顧客名	土谷内科医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市東成区深江南1-16-26		電話番号 : 06-6977-3633
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 3 Hr		
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルがつかない。本体下部より少しの水漏れ。

不具合原因、作業内容

(タッチパネル経年劣化によるもの → 交換
排水ドレン部パッキンその他経年劣化によるもの → 交換)

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 425
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☐ 排水ドレン Assy 交換
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☐ 有り	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017/8/4 / 398回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0107/T03D

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

タッチパネル (No: 124824C058960) 交換完了, 水漏れ消毒槽下部排水ドレン部交換
(6/23) (6/30)

装置 情報	交換後運転回数: 3 回	更新 (リセット) 実施: 未実施	消毒: 6 回	消毒+アル: 537 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 66 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田