

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 20年4月15日

販売名 サビ・スミ・アル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100733
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 20年4月15日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 13年5月16日
顧客名	黒田クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県尼崎市昭和通2-6-30 尼崎イスター1F		電話番号 : 06-6488-7222
作業区分 出張・引取	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 回目	定期点検シール記入 ☐	
	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 4/0
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ ※左上に多少亀裂あり	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019/4/15 / 7回目
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0.07 / To1.A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了

装置	交換後運転回数: 699 回	更新 (セット) 実施・未実施	消毒: 4354 回	消毒+7L: 0 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1918 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 13111606	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 150122-010	
給水フィルター	☒ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒660-0881 尼崎市昭和通2丁目6-50

TEL 06(6488)7222・FAX 06(6488)7233

黒田クリニック

ご署名

黒田 佳治



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山田