

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 20 年 6 月 9 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100472
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 20 年 6 月 9 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 12 年 5 月 29 日
顧客名	たなか内科クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県西宮市甲子園浦風町5-29		電話番号 : 0798-48-1171
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 / Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

保守部品交換等

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 531
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☐ ※正面左上と右下亀裂有り	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017/6/20/1172回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0107 / T03D

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

完了 (洗浄トレイ再生品お渡し)

装置 情報	交換後運転回数: 288 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 15 回	消毒+アル: 2037 回
	リークチェック: 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 回	エア単独: 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 16022228		接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 191031-002		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2 年 6 月 9 日

ご署名

田中 啓誠

(印)

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山田