

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019年11月29日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 301037
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年11月29日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2016年 11月 29日
顧客名	いわくら内科クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府松原市松ヶ丘1丁目6-25		電話番号 : 072-332-4477
作業区分 出張・引取	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 2 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☐	
	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾン水生成異常が頻繁に出る。
納入後未メンテナンス(3年間)の為保守点検依頼。

不具合原因、作業内容

消毒用トレーを外してファイバー以外のパーツ類を消毒した際、排水口に対象物が
吸い込まれた事による不具合が発生。
オゾンサイザーに逆流しオゾンガス生成異常が発生。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 330
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. 0207 / T03C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

オゾンサイザー管路内の水着除去⇒正常作動確認。
定期交換部の交換⇒運転良好。

装置 情報	交換後運転回数: 799 回	更新 (リセット) (実施)・未実施	消毒: 19 回	消毒+アル: 781 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 16072413	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 171016-004	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年12月2日

いわくら内科クリニック

岩倉 研二

ご署名



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店

大阪府大阪市中央区今橋1-6-1

TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田