

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2020年 8月 3日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300913
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 8月 3日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2016年 7月 13日
顧客名	中谷病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市鳴神123番地の1		電話番号	: 073-471-3111
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 461
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.66 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2019年8月6日 / 5438回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

1. オゾン水販売終了報告

装置 情報	交換後運転回数：1944 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒：913 回	消毒+アル：6469 回
	リークチェック：7 回	自己洗浄：1185 回	アルコール単独：2 回	エア単独：2 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 11070687	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 191008-001	
給水フィルター	☒ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	2本

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ：水槽側	☒ 1個
接続コネクタ：チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 8 月 3 日

林 美里 印

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田