

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 8月 20日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100231
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 8月 20日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2011年 8月 25日
顧客名	貝塚西出クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府貝塚市海塚2315-3		電話番号	: 072-433-3722
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 502
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2016/8/5 / 883回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / To3-D

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 N-102 10L (CP) DXP

アルコールキャップ 白⇒青。 G1F-XQ260, CF-200I, CV-290
次回定期メンテナンスシール等。 ミニマ W-II (160/201) (エッセイ 1-1)

装置	交換後運転回数: 228 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 301 回	消毒+アル: 1068 回
情報	リークチェック: 4 回	自己洗浄: 1092 回	アルコール単独: 5 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 18082255	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 191015-013	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 8月 20日

ご署名 工増田 裕子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

奥田