

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年 1月 24日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300747
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 1月 24日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2016年 1月 22日
顧客名	野口医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市城東区関目3丁目13-1		電話番号 : 06-6931-7821
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 542
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒	
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2019/1/16 / 3156回		
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T030		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1376 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1835 回	消毒+アル: 2697 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 13 回	アルコール単独: 5 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 18012996	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 181004-00271	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☒ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター 容器 撤去	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
マニホールド 7.7IL	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

中里 美代子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山