

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 1月 27日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 301340
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 1月 27日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2018年 1月 30日
顧客名	島谷内科医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市中央区花隈19-9 2階		電話番号 : 078-341-2186
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 823
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒	
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数			
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒	Ver. 0207 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 30 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 33 回	消毒+アル: 38 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 16052330		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 160624-000		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空系・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

島谷 理恵

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山