

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 1 月 20 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300487
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020 年 1 月 16 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015 年 1 月 14 日
顧客名	栗田医院 御中		ご担当 : 様
所在地	豊中市中央桜塚1丁目7-1		電話番号 : 06-6841-7671
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐	作業時間 2 Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 回目	定期点検シート記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合等は特に無し、正常運転確認。

納入後ほぼ未使用ではあるが5年経過の為経年劣化が予想され保守点検実施依頼、あわせてタッチパネル寿命が5年の為交換も実施

不具合原因、作業内容

定期保守点検内容とタッチパネルを交換、試運転

・タッチパネル・S/N:124824C059069.

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 306
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ (交換)
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205/T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

マニホールド周辺チューブ変色の為交換

装置 情報	交換後運転回数: 6 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 6 回	消毒+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 11080768	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 170306-003	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☒ 1個
水フィルター	☒ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 1 月 21 日

ご署名

徳田 優佳

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和