

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年7月30日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300566
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年7月30日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年7月2日
顧客名	うだ医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	滋賀県甲賀市土山町北土山1684-1		電話番号 : 0748-66-1050
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 7 MPa (緑)	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 328
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 282 回	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒: 1711 回	消毒+アル: 0 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒	1個	オゾン分解触媒 ☒	1個	排水栓 ☒	1個
交換後 No. 1205/013		接続コネクタ: 水槽側 ☐	1個	エアフィルター ☐	1個
オゾンセンサー ☐	1個	接続コネクタ: チューブ側 ☐	1個	水フィルター ☐	1個
交換後 No. 140825-010		オゾン水濃度計用フィルタ ☒	1個	吸盤 ☒	1個
給水フィルター ☐	1本	排水フィルター ☐	1個	マニホールド周辺チューブ ☒	1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

2020 年 7 月 30 日

ご署名 橋本 陽子 印

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井