

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2020年 9月 11日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300605
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 9月 11日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2015年 7月 24日
顧客名	山本医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県海南市下津町丸田147-3		電話番号	: 073-492-2219
作業区分 <u>出張・引取</u>	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 <u>1</u> Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

全く給水出来ないとの電話。
給水ホースが詰まっているか、水道は出ているか等確認して頂けい問題なし。
代替機を持参し、現場訪問

不具合原因、作業内容

消毒・自己洗浄・リークチェックをするが少しだけの水しか出ない。
給水ホースも確認。給水ホースのフィルター内部に、透明なアメーバ状のものが詰まっていた。
フィルターを清掃し、試運転したところ 正常終了。

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>665</u>
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ フィルター-清掃	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.69</u> ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. <u>0207 / 702C</u>

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

給水フィルター (ホース内) を清掃し、試運転。正常終了。

装置 情報	交換後運転回数：	3 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：	7 回	消毒＋アル：	179 回
	リークチェック：	0 回	自己洗浄：	178 回	アルコール単独：	0 回	エア単独：

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 9 月 11 日

ご署名 三宅直理子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田