

オゾン水濃度測定報告書

管理 No. 20200330

発行日 令和2年 3月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100055
作業年月日	令和 2 年 3 月 10 日	作業時間:	2 Hr
顧客名	大塚医院 御中	TEL:	075-881-3088
所在地	京都府京都市右京区梅津前田町65-4		
納入年月日	平成 22年 7 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	前回点検日: 令和元年10月21日

1: 測定方法

オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000に搭載されているオゾン水濃度計 (No. 17052795) につきまして基準器と比較しながら測定します。

2: 基準器

荏原実業株式会社製 オゾンモニタ 型式PL620A 製造番号6060184

3: 測定条件およびデータ

運転モード: 殺菌 水槽内容物: トレー

実測時間 (分)	タッチパネル 表示時間 分 (参考)	1回目: 13時04分		2回目: 13時22分	
		OED-1000	基準器	OED-1000	基準器
0.0	10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	10	0.18	0.33	0.35	0.23
1.0	9	0.70	0.63	0.75	0.69
1.5	9	0.69	0.74	0.68	0.71
2.0	8	0.61	0.63	0.62	0.62
2.5	8	0.73	0.78	0.71	0.75
3.0	7	0.60	0.66	0.61	0.64
3.5	7	0.75	0.78	0.72	0.75
4.0	6	0.62	0.67	0.61	0.64
4.5	6	0.79	0.76	0.75	0.78
5.0	5	0.65	0.70	0.62	0.66
5.5	5	0.75	0.66	0.78	0.77
6.0	4	0.65	0.73	-	0.69
計測器の平均値		0.69	0.70	0.69	0.70
タッチパネルの殺菌履歴		0.69		0.69	

単位 (ppm)

4: 測定結果

基準器に対してタッチパネルの殺菌履歴濃度が 0.7 ± 0.2 ppm以内であること。

測定1回目: 基準器 0.70ppm タッチパネルの殺菌履歴 0.69ppm・・・合格

測定2回目: 基準器 0.70ppm タッチパネルの殺菌履歴 0.69ppm・・・合格

修理業者 株式会社 IHIアグリテック 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528



承認	作業者
若井 20.3.30	中澤 20.3.30

オゾン水濃度測定 工事写真

撮影日：令和2年3月10日

撮影場所:大塚医院様 (京都府京都市)

写真1:計測状況全景



写真2:基準器拡大



写真3:タッチパネル拡大



写真4:タッチパネル「装置情報」

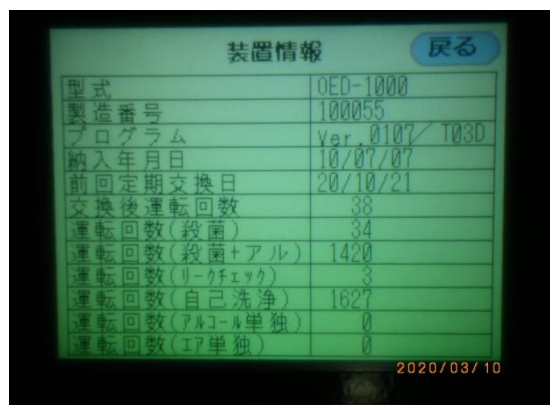


写真5:タッチパネル「殺菌履歴」



(様式 EO-H1001-07)




証明書番号 EJ810020
(Certificate No.)

校正証明書

(Calibration Certificate)

株式会社IHIアグリテック 御中
(Customer name)

荏原実業株式会社 計測器・医療本部
〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-3-12

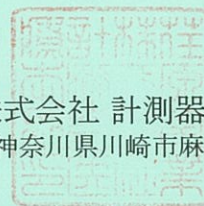

Ebara Jitsugyo Co. Ltd.
Measuring Instrument and Medical Division
2-3-12 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa, 215-0033 JAPAN

名称
(Product name)

オゾンモニタ
Ozone Monitor

型式
(Model)

PL-620A

製造番号
(Serial No.)

6060184

校正実施月日
(Calibration date)

2019/2/7

上記測定器は、当社のオゾンモニタ基準器と比較
校正したことを証明致します。

We hereby certify that the above mentioned equipment was calibrated
in comparison with our ozone monitor standard.

使用基準器
(Standard used)

型 式
(Model)

EL-2001S

基準器管理番号
(Control No. of standard)

EK010A0