

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200129

発行日: 2020 年 1 月 29 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500054
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 1 月 29 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	河西田村病院 様	TEL: 073-455-1015
所在地	和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1番11号	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 7 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2020年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 圧 12.5 MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 809
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ 蛇口ハンドル下 増締め	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 洗剤ボックホク	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 421 → 更新 (リセット) 実施・未実施		殺菌/消毒： 207 / 7	殺菌/消毒+7L： 216 / 17
	リークチェック： 0	自己洗浄： 154	アルコール単独： 23	エア単独： 5

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 51811049 ← 17112940			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☒	水フィルター	☒
141219-004 ← 170821-003			接続コネクタ; チューブ側	☒	水槽	☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 1 月 29 日

ご署名 中澤 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

中澤

中澤