

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 12月 9日

|                               |                                                                        |                               |                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                           | Ver. 3.1                      | 製造番号 : 300411                                 |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>               | Ver. 3.1                      | 作業年月日 : 2020年 12月 9日                          |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                   | Ver. 1.0                      | 納入年月日 : 2014年 12月 17日                         |
| 顧客名                           | みね内科クリニック 御中                                                           |                               | ご担当 : 院長先生 様                                  |
| 所在地                           | 和歌山県新宮市緑ヶ丘2丁目2-55                                                      |                               | 電話番号 : 0735-22-5551                           |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/>     | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間 / Hr                                     |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> | 6回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>              | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                         |
|----------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 572         |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm      |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2018/12/5 / 1807回                                       |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転アラームバージョン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0205 / T02C |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

ミニJIS-II : 2003251

|    |                  |                  |                |                |
|----|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 装置 | 交換後運転回数 : 322 回  | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒 : 976 回     | 消毒+7L : 1561 回 |
| 情報 | リークチェック : 2522 回 | 自己洗浄 : 728 回     | アルコール単独 : 11 回 | エア単独 : 0 回     |

| 交換部品名称                                         | 交換・数量 |
|------------------------------------------------|-------|
| オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| 交換後 No. 51811069                               |       |
| オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| 交換後 No. 151109-017                             |       |
| 給水フィルター <input type="checkbox"/> 1本            |       |
| (中空糸・活性炭・糸巻)                                   |       |

| 交換部品名称                                               | 交換・数量 |
|------------------------------------------------------|-------|
| オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/> 1個       |       |
| 接続コネクタ; 水槽側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |       |
| 接続コネクタ; チューブ側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| オゾン水濃度計用フィルタ <input checked="" type="checkbox"/> 1個  |       |
| 排水フィルター <input type="checkbox"/> 1個                  |       |
| (従来型・新型)                                             |       |

| 交換部品名称                                     | 交換・数量 |
|--------------------------------------------|-------|
| 排水栓 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| エアフィルター <input type="checkbox"/> 1個        |       |
| 水フィルター <input type="checkbox"/> 1個         |       |
| 吸盤 <input checked="" type="checkbox"/> 1個  |       |
| マニホールド周辺チューブ <input type="checkbox"/> 1セット |       |
|                                            |       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 9 日

ご署名

山本 豊子

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL : 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山本

奥田