

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 20 年 7 月 29 日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 301529 作業年月日 : 20 年 7 月 29 日 納入年月日 : 18 年 7 月 30 日
顧客名	クレモト外科 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市広畑区西夢前台 8 丁目 1		電話番号 : 079-237-0301
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
出張・引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 回目 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

保守部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 461
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☐	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / To4C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

OK

装置 情報	交換後運転回数: 754 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1531 回	消毒+アル:	回
	リークチェック: 1516 回	自己洗浄:	回	アルコール単独:	回
			回	エア単独:	回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1 個
交換後 No. 11080769	
オゾンセンサー	☒ 1 個
交換後 No. 18/001-002M1	
給水フィルター	☐ 1 本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1 個
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1 個
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1 個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1 個
排水フィルター	☐ 1 個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☐ 1 個
エアフィルター	☐ 1 個
水フィルター	☐ 1 個
吸盤	☐ 1 個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1 セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 20 年 7 月 29 日
姫路市広畑区西夢前台 8-1

クレモト外科

ご署名

芳野 圭介



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

Tel (079) 5917400

作業者

山田