

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 1月 5日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100328
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 1月 5日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2012年 1月 11日
顧客名	長崎医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府藤井寺市岡町2丁目1-4		電話番号	: 0729-55-7070
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	9回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 459
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 交換
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017/1/13 / 2421回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0107 / T03D

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了。正常運転確認。

装置	交換後運転回数: 731 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1268 回	消毒+7L: 2777 回
情報	リークチェック: 4 回	自己洗浄: 2070 回	7L単独: 8 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 52003072	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 191015-011	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空系・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 1 月 5 日

ご署名

森田 光子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田