

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 4月 21日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300530
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 4月 21日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年 4月 8日
顧客名	たかあきクリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	京都府京都市下京区中堂寺坊城町31-7 メディテック丹波口1階		電話番号 : 075-822-8221
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

トレイ割れ

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残9MPa(緑)	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 570
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ (割れ有)	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/4/11 / 1513回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

トレイ 交換

装置	交換後運転回数: 675 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 730 回	消毒+アル: 2180 回
情報	リークチェック: 2125 回	自己洗浄: 457 回	アルコール単独: 22 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 16082479	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 130529-008	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤 (お渡し)	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 4月 21日
院長 高 顯 純 平

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井