

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 1月 19日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300707
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 1月 19日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年 12月 14日
顧客名	楽クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市築港3-21-2		電話番号 : 073-433-5000
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐
			作業時間 / Hr
		定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/9 E:103
1/13 E:206

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 258
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐ 79771パックン※代
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日／交換回数	2019/1/23 / 2146回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / 104C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

次回 マニホールド周辺チューブ交換

装置	交換後運転回数: 770 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 2598 回	消毒+7L: 974 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1113 回	7L単独: 10 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 52003/12		接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 12/023-015		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 1 月 19 日

ご署名

橋田 有希子

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田