

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020年 5月 13日

販売名 サビ・スミ・ニール Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301465
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 5月 13日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2018年 5月 24日
顧客名	つるみクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市中央区難波4-2-4 ヤシマ御堂筋ビル6階		電話番号	: 06-4396-3900
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 Hr /
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☐
	出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 562
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数		/
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☐ Ver. 0207 / T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 320 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒： 272 回	消毒+アル： 391 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 258 回	アルコール単独： 1 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 16032264		接続コネクタ；水槽側	☒ 1個	エアフィルター	☒ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ；チューブ側	☒ 1個	水フィルター	☒ 1個
交換後 No. 120516-012		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☒ 1本	排水フィルター	☐ 1個		
(中空糸・活性炭・糸巻)	(未設置)				

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

大阪府大阪市中央区難波4丁目2番4号
〒542-0076 いちご御堂筋ビル6階
TEL06-4396-3900 FAX06-4396-3909

医療法人 太 讃 会
つるみクリニック 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

理事長 鶴 貴博 技術者 和田 俊彦

和田