

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 2月 2日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 500209
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 2月 2日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	納入年月日	: 2019年 3月 26日
顧客名	吹上クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市吹上2丁目5-28		電話番号	: 073-423-2700
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E: 212 (1/13, 1/18, 1/27)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 764
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302 / T11A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

GIF-H170, GIF-XP170N, PCF-H170I, アイエスウォッシュ使用

装置	交換後運転回数: 284 回	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 6 回	消毒+7L: 278 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	7L単独: 2 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 51809041	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 130510-006	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☒ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 2 日

ご署名 中井 修之 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田