

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 5月 14日

|                               |                                                         |                               |                               |                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> | Ver. 3.1                      | 製造番号                          | : 100223                                      |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>           | Ver. 3.1                      | 作業年月日                         | : 2020年 5月 14日                                |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>    | Ver. 1.0                      | 納入年月日                         | : 2011年 5月 12日                                |
| 顧客名                           | 大間知クリニック 御中 (2F)                                        |                               | ご担当                           | : 院長先生 様                                      |
| 所在地                           | 大阪府東大阪市長堂2丁目15-10                                       |                               | 電話番号                          | : 06-6618-1000                                |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/>                  | 無償 <input type="checkbox"/>   | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間 1.5 Hr                                   |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>                | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 9回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/>                             | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                                  |              |                   |                                                 |
|----------|----|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | エアライン        | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | オゾン水濃度計動作    | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 499    |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | 排水栓、排水ライン    | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | 細管送水ライン      | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | 排気ライン        | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | オゾン濃度        | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | 異常音、振動       | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | 電源コード        | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | 殺菌チューブ類      | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 操作部ピン根元に亀裂あり | マニホールド周辺チューブ | 正常                | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | 前回交換日/交換回数   | 2020/5/14 / 3327回 |                                                 |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              | 運転プログラムバージョン | 正常                | <input type="checkbox"/> Ver. 0107 / Tol. A     |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |                |                  |               |               |
|----------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 227 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 1085 回    | 消毒+アル: 2242 回 |
|          | リークチェック: 2 回   | 自己洗浄: 1445 回     | アルコール単独: 50 回 | エア単独: 3 回     |

| 交換部品名称                                         | 交換・数量 |
|------------------------------------------------|-------|
| オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| 交換後 No. 13031334                               |       |
| オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| 交換後 No. 12910-012                              |       |
| 給水フィルター <input type="checkbox"/> 1本            |       |
| (中空糸・活性炭・糸巻)                                   |       |

| 交換部品名称                                              | 交換・数量 |
|-----------------------------------------------------|-------|
| オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/> 1個      |       |
| 接続コネクタ; 水槽側 <input type="checkbox"/> 1個             |       |
| 接続コネクタ; チューブ側 <input type="checkbox"/> 1個           |       |
| オゾン水濃度計用フィルタ <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| 排水フィルター <input type="checkbox"/> 1個                 |       |
| (従来型・新型)                                            |       |

| 交換部品名称                                                | 交換・数量 |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 排水栓 <input checked="" type="checkbox"/> 1個            |       |
| エアフィルター <input type="checkbox"/> 1個                   |       |
| 水フィルター <input type="checkbox"/> 1個                    |       |
| 吸盤 <input checked="" type="checkbox"/> 1個             |       |
| マニホールド周辺チューブ <input checked="" type="checkbox"/> 1セット |       |
| <input type="checkbox"/>                              |       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2 年 5 月 14 日

ご署名 川端 美智子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 和田  |