

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 6月 2日

販売名 サビ・スミ・ニール Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301038	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 6月 2日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2016年 11月 28日	
顧客名	にし内科胃腸科 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府貝塚市半田1-17-17			電話番号	: 072-420-2400
作業区分 (出張・引取)	有償 ☐	無償 ☒	保証期間 ☐	作業時間	1.5 Hr
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/21, 17:39 オゾン水生成異常2 (E:215)
5/30, 8:44 "
6/2, 8:47, 8:51, 9:23 "

不具合原因、作業内容

現地試運転 => 正常終了
念の為 部品交換 => オゾン生成異常2 (E:215) 代替対応

点検項目

フタロック	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
アルコールライン	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
オゾンセンサ	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水位センサー	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
水漏れ確認	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
清掃	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
トレー	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207/1020C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

GIF-XP170N, 左下に洗濯ネット, CV-170, 表示バグ対応

装置	交換後運転回数: 161 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 4 回	消毒+アル: 1225 回
情報	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 5200 1012	
オゾンセンサー ☐ 1個	
交換後 No.	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☐ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☐ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☐ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 6月 2日

西

美晴



ご署名

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者



奥田