

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 6月 3日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100791
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 6月 3日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2013年 7月 3日
顧客名	たいしょう生協診療所 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市大正区千島1-20-12		電話番号 : 06-6554-1197
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 2.5 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

本体底部より水漏れ
定期保守(6月)

不具合原因、作業内容

排水系接続部(洗浄槽下部排水栓付近)より水漏れ。ナット緩みとパッキン劣化が原因とみられる。分解・清掃・締め直しにより水漏れ止め。

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 476
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☐ あり(水漏れ)
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☐	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☐
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2018/7/2 / 499回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0107 / Tol. A

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 144 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 366 回	消毒+アル: 425 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 39 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 13061441	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 151126-008	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 6月 3日

ご署名

月 日

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田