

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 6月 11日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100745
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年 6月 11日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2013年 6月 27日
顧客名	明日香村国民健康保険診療所 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	奈良県高市郡明日香村立部745		電話番号 : 0744-54-3005
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 2.5 Hr
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	7回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 3/3
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 209 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/6/21 / 405回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / T03D

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

次回定期メンテナンス要。
保守前日の運転時水漏れがあったと当日現場で報告をうける。
排水栓下のバルブが濡れているのを指摘。

装置	交換後運転回数: 68 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 297 回	消毒+アル: 262 回
情報	リークチェック: 5 回	自己洗浄: 295 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 12071131	
オゾンセンサ	☒ 1個
交換後 No. 160201-001	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 6月 11日

奈良県高市郡明日香村大字立部745番地
明日香村国民健康保険診療所

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田