

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 7月 1日

|                               |                                                          |                               |                               |                |                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>             | Ver. 3.1                      | 製造番号                          | : 300915       |                                     |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> | Ver. 3.1                      | 作業年月日                         | : 2020年 7月 1日  |                                     |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>     | Ver. 1.0                      | 納入年月日                         | : 2016年 7月 13日 |                                     |
| 顧客名                           | 新阿武山病院 御中                                                |                               |                               | ご担当            | : 院長先生 様                            |
| 所在地                           | 大阪府高槻市奈佐原4丁目10番1号                                        |                               |                               | 電話番号           | : 072-693-1881                      |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/>                   | 無償 <input type="checkbox"/>   | 保証期間 <input type="checkbox"/> | 作業時間           | / Hr                                |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>                 | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 4回目                           | 定期点検シール記入      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/>                              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>  | 修理表示貼付         | <input type="checkbox"/>            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                        |
|----------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 741        |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm     |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                 |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | /                                                      |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207/ T03C |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 待機時 主電源ON。専用給排水。

アルコールキャップ 白から青へ。2012年購入・岸上氏(東邦)  
CV-170, GIF-H170×②, TE-261ER, CPS-2800

|    |                |                  |              |              |
|----|----------------|------------------|--------------|--------------|
| 装置 | 交換後運転回数: 109 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 186 回    | 消毒+アル: 358 回 |
| 情報 | リークチェック: 3/3 回 | 自己洗浄: 161 回      | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称             | 交換・数量                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| オゾン水濃度計            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 17062803   |                                        |
| オゾンセンサー            | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 交換後 No. 161025-002 |                                        |
| 給水フィルター            | <input type="checkbox"/> 1本            |
| (中空糸・活性炭・糸巻)       |                                        |

| 交換部品名称        | 交換・数量                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ: 水槽側   | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 接続コネクタ: チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| 排水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| (従来型・新型)      |                                        |

| 交換部品名称       | 交換・数量                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 排水栓          | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| エアフィルター      | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 水フィルター       | <input type="checkbox"/> 1個            |
| 吸盤           | <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |
| マニホールド周辺チューブ | <input type="checkbox"/> 1セット          |
|              | <input type="checkbox"/>               |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2020年 7月 1日  
東海林 幸枝 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 奥田  |