

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年3月10日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 300010 作業年月日 : 2020年3月10日 納入年月日 : 13年3月18日
顧客名 所在地	多可赤十字病院 御中 兵庫県多可郡多可町中区岸上280		ご担当 : 院長先生 様 電話番号 : 0795-32-1223
作業区分 出張・引取	有償 ☒ 無償 ☐ 保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 修理 ☐ 点検のみ ☐	保証期間 ☐ 7 回目 その他 ☐	作業時間 / Hr 定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守部品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ 表示数 384
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 / ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	18.3.26 /	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver.0207 / TOXC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

完了 (排水フィルター新型は、現在排水エラーが検出されているのでシンク左側に立て掛けておきます)

装置 情報	交換後運転回数: 812 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1160 回	消毒+アル: 2678 回
	リークチェック: 206 / 回	自己洗浄: 935 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. / 2081139	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. / 180219-005	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年3月10日

ご署名 山田 新

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	山田